



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met AeroChamber® met masker (voor kinderen)

Vanaf leeftijd 0 tot 6 maanden: babymasker oranje

Vanaf leeftijd 6 maanden tot 4 jaar: kindermasker geel

Vanaf leeftijd 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassen masker blauw of kindermasker als de pasvorm daarvan beter is

Let op goede pasvorm van het masker, afgestemd op het kind

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor eerste gebruik:

Bij een nieuwe dosisaërosol :schudden en 3 doses wegspuiten;
één week of langer niet gebruikt: schudden en één dosis wegspuiten.

Voor elk gebruik:

2. De mond moet leeg zijn.
3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
4. Schud de dosisaërosol krachtig.
5. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden, recht vooruit in het achterstuk van de AeroChamber®.
6. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

7. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
8. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
9. - Druk de dosisaërosol 1 keer in.
- Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de AeroChamber®. Masker goed aangesloten houden en niet huilen. De Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.
10. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol met de AeroChamber® schudden en herhalen vanaf punt 7. Spuit niet meer dan één pufje tegelijk in de AeroChamber®
11. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.

Inhalatieprotocol AeroChamber® met masker - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



- 12. Na inhalatie van inhalatiecorticosteroiden de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Indien dit niet mogelijk is dan iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Schoonmaken

- 13. AeroChamber® één maal per week schoonmaken.
- 14. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 15. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 16. De AeroChamber® niet afspoelen, en niet afdrogen.
- 17. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 18. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 19. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 20. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 21. Verwijs naar een filmpje dat aansluit bij dit inhalatieprotocol.