



# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_



## Inhalatieprotocol dosisaërosol met Babyhaler® met masker (voor kinderen)

*Voor leeftijd 1-4 jaar*

### Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### *Voor het eerste gebruik:*

2. De Babyhaler® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).  
 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.  
 4. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten.

#### *Voor elk gebruik:*

5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.  
 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten.  
 7. De mond moet leeg zijn.  
 8. Zet de Babyhaler® in elkaar.  
 9. Controleer de werking van de blauwe ventielen; plaats masker op vlakke ondergrond, druk de Babyhaler® zachtjes heen en weer, de ventielen bewegen zichtbaar.  
 10. Schud de dosisaërosol krachtig.  
 11. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de Babyhaler®.  
 12. De dosisaërosol met Babyhaler® is nu klaar voor gebruik.

### De inhalatie

13. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.  
 14. Houd de Babyhaler® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.  
 15. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.  
– **Laat het kind 10 keer rustig in- en uitademen** door de Babyhaler®, de ventielen bewegen zichtbaar.  
– Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer er voor te zorgen dat het kind niet huilt.  
 16. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Babyhaler® halen en instructie herhalen vanaf punt 10. Spuit nooit meer dan 1 dosis tegelijk in de Babyhaler®.

*Inhalatieprotocol Babyhaler® met masker voor kinderen - versie 2.1*

*De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl)*



# LAN

Long Alliantie Nederland



- 17. Verwijder de dosisaërosol van de Babyhaler®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 18. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

## Schoonmaken

- 19. Babyhaler® éénmaal per week schoonmaken.
- 20. Haal de Babyhaler® uit elkaar.
- 21. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 22. De Babyhaler® niet afspoelen, niet afdrogen.
- 23. Laat de Babyhaler® aan de lucht drogen.
- 24. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Babyhaler® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 25. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 26. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 27. De Babyhaler® eenmaal per jaar vervangen.
- 28. Vervang de ventielen na 6 maanden bij dagelijks gebruik of eerder als ze beschadigd zijn.

## Tenslotte

- 29. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.