



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met grootmasker

Let op: masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan

Patiënten informatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van dosisaerosol.
 3. Krachtig schudden en 3 doses wegspuiten.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.
 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegspuiten.
 6. De mond moet leeg zijn.
 7. Schud de dosisaerosol krachtig.
 8. Plaats de dosisaerosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de InspiraChamber®.
 9. De dosisaerosol met InspiraChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 11. Houd de InspiraChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.
 12. – **Adem volledig uit.**
– Druk de dosisaerosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing.
– **5 keer rustig in- en uitademen door de InspiraChamber®.** Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inhaleren. Het masker goed aangesloten houden totdat de patiënt klaar is.
 13. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaerosol uit de InspiraChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf stap 7. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de InspiraChamber®.
 14. Verwijder de dosisaerosol uit de InspiraChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaerosol.
 15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Inhalatieprotocol dosisaerosol InspiraChamber® met grootmasker - versie 1.1

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



Schoonmaken

- 16. Inspirachamber® één maal per week schoonmaken.
- 17. Haal de Inspirachamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en het masker van de Inspirachamber®.
- 18. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 19. De Inspirachamber® afspoelen, niet afdrogen.
- 20. Laat de Inspirachamber® en onderdelen aan de lucht drogen.
- 21. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Inspirachamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaerosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaerosol staat hoeveel doses erin zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaerosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
- 24. De Inspirachamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 25. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.