



# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_



## Inhalatieprotocol dosisaërosol met Space Chamber® met masker (voor kinderen)

*Let op goede pasmaat van het masker, afgestemd op het kind*

Een indicatie hiervoor is:

- Voor kinderen tot 1 jaar: masker small en Space Chamber® compact
- Voor kinderen van 1 tot 4 jaar: masker medium en Space Chamber® Plus
- Voor kinderen vanaf 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassen masker large of masker 1 tot 4 jaar als de pasvorm daarvan beter is en Space Chamber® Plus.

### Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

**Voor eerste gebruik:**

- 2. De Space Chamber® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).
- 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
- 4. Krachtig schudden en 3 doses wegsputen.

**Voor elk gebruik:**

- 5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
- 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputen.
- 7. De mond moet leeg zijn.
- 8. Schud de dosisaërosol krachtig.
- 9. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de Space Chamber®.
- 10. De dosisaërosol met Space Chamber® is nu klaar voor gebruik.

### De inhalatie

- 11. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
- 12. Houd de Space Chamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
- 13. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.  
– **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de Space Chamber®.** Masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt. De Klep moet zichtbaar open en dicht gaan.

*Inhalatieprotocol dosisaërosol met Space Chamber® met masker (voor kinderen) - versie 1.1*

*De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl)*



# LAN

Long Alliantie Nederland



- 14. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Space Chamber® halen en herhalen vanaf punt 8. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de Space Chamber®.
- 15. Verwijder de dosisaërosol uit de Space Chamber®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

## Schoonmaken

- 17. Space Chamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 18. Haal de Space Chamber® uit elkaar. Verwijder het flexibele achterstuk (duim erin en trekken).
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwaspopje.
- 20. De Space Chamber® niet afspoelen, niet afdrogen.
- 21. Laat de Space Chamber® aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Space Chamber® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten: eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 24. De Space Chamber® eenmaal per jaar vervangen.

## Tenslotte

- 25. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.