



# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_



## Inhalatieprotocol dosisaërosol Space Chamber® met masker

*Let op: Masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan*

### Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### Voor eerste gebruik:

2. De Space Chamber® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).  
 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.  
 4. Krachtig schudden en 3 doses wegsputen.

#### Voor elk gebruik:

5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.  
 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputen.  
 7. De mond moet leeg zijn.  
 8. Schud de dosisaërosol krachtig.  
 9. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de Space Chamber®.  
 10. De dosisaërosol met Space Chamber® is nu klaar voor gebruik.

### De inhalatie

11. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.  
 12. Houd de Space Chamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.  
 13. – **Adem volledig uit.**  
– Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing.  
– **5 keer rustig in- en uitademen door de Space Chamber®**, klep moet hoorbaar open en dicht gaan.  
 14. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Space Chamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf stap 8. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de Space Chamber®.  
 15. Verwijder de dosisaërosol van de Space Chamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.  
 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

*Inhalatieprotocol dosisaërosol Space Chamber® met masker - versie 2.0*

*De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl)*



## Schoonmaken

- 17. Space Chamber® één maal per week schoonmaken.
- 18. Haal de Space Chamber® uit elkaar. Verwijder het flexibele achterstuk (duim erin en trekken).
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 20. De Space Chamber® niet afspoelen, niet afdrogen.
- 21. Laat de Space Chamber® aan de lucht drogen.
- 22. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Space Chamber® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 23. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten. Eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 24. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 25. De Space Chamber® eenmaal per jaar vervangen.

## Tenslotte

- 26. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.