



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol AeroChamber® met grootmasker

LET OP: Masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan.

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als de AeroChamber®.
 3. Schudden en 3 doses wegsputen.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputen.
 6. De mond moet leeg zijn.
 7. Schud de dosisaërosol krachtig.
 8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de AeroChamber®. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

9. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 10. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.
 11. - **Adem volledig uit.**
- Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing.
- **5 keer rustig in- en uit ademen door de AeroChamber®.** De Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar. Het masker goed aangesloten houden totdat de patiënt klaar is.
 12. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de AeroChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf stap 7. Spuit niet meer dan één pufje in de AeroChamber®.
 13. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de AeroChamber®.
 14. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen en het tweede slokje doorslikken. Of indien nodig iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.



LAN

Long Alliantie Nederland



Schoonmaken

- 15. AeroChamber® één maal per week schoonmaken
- 16. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 17. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 18. De AeroChamber® afspoelen en **niet** afdrogen.
- 19. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 20. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 21. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 22. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 23. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.