



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met AeroChamber® met mondstuk (voor kinderen)

vanaf leeftijd 4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaërosol als de AeroChamber®.
 3. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten.
 6. De mond moet leeg zijn.
 7. Schud de dosisaërosol krachtig.
 8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de AeroChamber®.
 9. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 11. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten.
 12a. De standaardmethode
– Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
– Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing.
– Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen door de AeroChamber®, de Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.
 12b. Indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener: 1-teug methode:
– Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
– Druk de dosisaërosol in bij het begin van de inademing.
– **Laat het kind één keer rustig en zo diep mogelijk inademen** en vervolgens 10 seconden de adem vasthouden.
 13. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inhaleren.
 14. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de AeroChamber® halen en de instructie herhalen vanaf punt 7. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de AeroChamber®.



LAN

Long Alliantie Nederland



- 15. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de AeroChamber®.
- 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.

Schoonmaken

- 17. AeroChamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 18. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 20. De AeroChamber® afspoelen, niet afdrogen.
- 21. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen.
- 22. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 23. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 24. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 25. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 26. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.