



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met InspiraChamber® met mondstuk (voor kinderen) vanaf leeftijd 4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.
 3. Krachtig schudden en 3 doses wegsputen.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als de InspiraChamber®.
 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis weg spuiten.
 6. De mond moet leeg zijn.
 7. Schud de dosisaërosol krachtig.
 8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden recht vooruit in de InspiraChamber®.
 9. De dosisaërosol met InspiraChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 11. Houd de InspiraChamber® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten.
 12a. *De standaardmethode*
 - Laat het kind indien mogelijk volledig uitademen.
 - Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing.
 - **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de InspiraChamber® de klep moet zichtbaar open en dicht gaan.
- 12b. *Indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener: 1-teug methode:*
 - Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
 - Druk de dosisaërosol in bij het begin van de inademing.
 - **Laat het kind één keer rustig en zo diep mogelijk inademen** en vervolgens 10 seconden de adem vasthouden.
13. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inhaleren.
 14. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de InspiraChamber® halen en de instructie herhalen vanaf punt 7. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de InspiraChamber.

Inhalatieprotocol dosisaërosol met InspiraChamber® met mondstuk (voor kinderen) - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



- 15. Verwijder de dosisaërosol uit de InspiraChamber®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol, niet op de InspiraChamber®.
- 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.

Schoonmaken

- 17. InspiraChamber® één maal per week schoonmaken.
- 18. Haal de InspiraChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk van de InspiraChamber.
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 20. De InspiraChamber® afspoelen, niet afdrogen.
- 21. Laat de InspiraChamber® aan de lucht drogen.
- 22. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de InspiraChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten. Turf de doses en noteer de datum van aanbreken. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 24. De InspiraChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 25. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.