



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol Genuair®

Patienteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

2. De mond moet leeg zijn.
3. Houd de Genuair® horizontaal met de gekleurde knop naar boven. Verwijder de beschermdop van het mondstuk.
4. Druk de gekleurde knop aan de achterzijde volledig in. Er volgt een dubbele klik en laat de gekleurde knop weer los. Doe dit alleen vlak voor de inhalatie.
5. Kijk of het controlevenster groen is.
6. De Genuair® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

7. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
8. **Adem langzaam en volledig uit**, niet in de Genuair®.
9. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.
10. **Inhaleer zo diep mogelijk met een krachtige inademing**. Binnen de eerste seconde volgt een klik. Stop niet, ga door met inademen.
11. Houd de adem 10 seconden vast of zo lang als comfortabel is. Neem intussen de Genuair® uit de mond.
12. Adem rustig uit.
13. Controleer of de kleur van het controlevenster in rood is veranderd. Indien het controlevenster nog steeds groen is, herhaal vanaf punt 7.
14. Plaats de beschermdop op het mondstuk.
15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken.

Schoonmaken

16. Het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspoelen.

Aandachtspunten

17. De dosisteller geeft het aantal nog beschikbare doses aan. De dosisteller zal in stappen van 10 aftellen. Indien er een rood gestreept vlak verschijnt in de dosisteller, is de Genuair® bijna leeg.
18. Bewaar de Genuair® op kamertemperatuur en op een droge plaats. Niet in de badkamer of de keuken.



LAN

Long Alliantie Nederland



Tenslotte

- 19. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.