



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met OptiChamber® met masker (voor kinderen)

<Let op goede pasmaat van het masker, afgestemd op het kind>

Een indicatie hiervoor is:

- Voor kinderen tot 1 jaar: masker S
- Voor kinderen van 1 tot 4 jaar: masker M
- Voor kinderen vanaf 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: kies (volwassen) masker L of masker M als de pasvorm daarvan beter is.

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
3. De dosisaërosol krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de OptiChamber®.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de OptiChamber®.
6. De mond moet leeg zijn.
7. Schud de dosisaërosol krachtig.
8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de OptiChamber®.
9. De dosisaërosol met OptiChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
11. Houd de OptiChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
12. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.
– **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de OptiChamber®.
– Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt.
13. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de OptiChamber® halen. Herhaal vervolgens de instructie vanaf punt 6. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de OptiChamber®.

Inhalatieprotocol dosisaërosol met OptiChamber® met masker (voor kinderen) - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



- 14. Verwijder de dosisaërosol van de OptiChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Schoonmaken

- 16. OptiChamber® één maal per week schoonmaken.
- 17. Haal de OptiChamber® uit elkaar. Verwijder het masker en het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 18. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 19. Vervolgens de onderdelen afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 20. Laat alles aan de lucht drogen.
- 21. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de OptiChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 24. De OptiChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 25. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.