




# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_

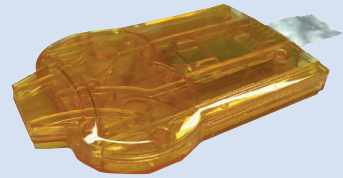

## Inhalatieprotocol Twincer®

### Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### Voor elk gebruik:

2. De mond moet leeg zijn.
3. Haal de Twincer® uit de verpakking.
4. Leg de Twincer® op de tafel en verwijder de uitstekende blisterstrip.
5. Na het verwijderen van deze blisterstrip is de Twincer® klaar voor gebruik.

### De inhalatie

6. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
7. **Adem langzaam en volledig uit**, niet in de Twincer®.
8. Breng de Twincer® horizontaal naar de mond.
9. Plaats het mondstuk tussen de tanden met de lippen eromheen.
10. **Inhaleer zo diep mogelijk met een krachtige inademing.**
11. Houd de adem 10 seconden vast of zo lang als comfortabel is. Neem intussen de Twincer® uit de mond.
12. Adem rustig uit, niet in de in de inhalator.
13. Check of de blister leeg is en inhaleer zo nodig nogmaals (vanaf stap 6).
14. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken.

### Schoonmaken

15. Na gebruik de Twincer® weggooien bij het huishoudelijk afval, de Twincer® is voor eenmalig gebruik!

### Aandachtspunten

16. Bewaar nieuwe Twincers® op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of de keuken.

### Tenslotte

17. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.

*Inhalatieprotocol Twincer® - versie 1.0*